





REVEAL[®] TP (Syphilis)

Antibody Test

Fiche de procédure

-  Dispositif médical in vitro
-  Conserver à 2-30°C
-  Lire attentivement la notice avant utilisation
-  Ne pas réutiliser




CONDITIONS DE STOCKAGE : À conserver dans un endroit sec à 2 à 30 °C. Le Reveal[®] TP est stable jusqu'à douze (12) mois. Ne laissez pas ouvertes les pochettes contenant la cartouche de test et le bouchon InstantGold[™]. N'utilisez pas d'appareils périmés.

COLLECTE ET MANIPULATION D'ÉCHANTILLONS

Étape 1

Déboucher et placez le flacon de tampon universel 1 dans l'orifice du plateau d'essai.

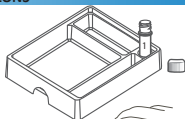


Étape 2

À l'aide du tampon d'alcool, nettoyez l'index, et laissez sécher complètement.




Étape 3

Retirer le capuchon protecteur de la lancette stérile fournie avec le test. Ne pas utiliser la lancette si elle est endommagée ou compromise.

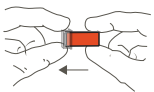


Étape 4

Appuyer fermement la lancette contre le site de ponction pour activer le dispositif et perforer la peau.

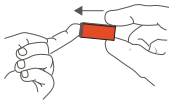


Étape 5

Pointer le doigt piqué vers le bas et appliquer une légère pression à côté du site de ponction afin de permettre à une goutte de sang de se former. Éviter de presser le doigt pour le faire saigner.

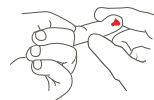

Étape 6


Utiliser la pipette à remplissage automatique pour recueillir une goutte de sang au site de ponction au doigt. Pour ce faire, toucher l'extrémité de la pipette à l'échantillon de sang en position horizontale.

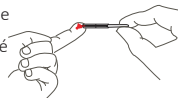

L'échantillon de sang sera automatiquement aspiré jusqu'à la ligne de remplissage noire et s'arrêtera. Ne pas presser la poire de la pipette pendant le remplissage. S'il y a un excès de sang autour de l'extrémité de la pipette, essuyer délicatement avec un tissu propre.


Étape 7

Placer l'extrémité de la pipette à remplissage automatique dans le tampon universel du flacon de tampon universel 1. Presser la poire pour vider l'échantillon de sang dans le flacon. Jeter la pipette à remplissage automatique. Refermer le flacon de tampon universel 1.

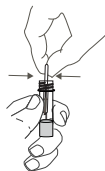

Étape 8

Tenir le flacon de tampon universel 1 et tapoter doucement le côté du flacon près du fond jusqu'à ce que le mélange devienne d'une couleur rougeâtre claire.

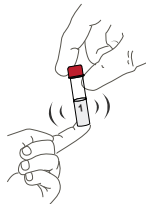

Étape 9

Procéder à la PROCÉDURE DE TEST

PROCÉDURE DE TEST


Étape 1

Verser tout le contenu du flacon de tampon universel 1 au centre de la cartouche de test. Laisser la solution être complètement absorbée.



Étape 2

Placer le bouchon InstantGold[™] sur la cartouche de test.

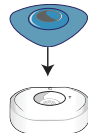





Étape 3

Verser tout le contenu du flacon de tampon universel 2 dans le bouchon InstantGold[™] et laisser la solution être complètement absorbée. Retirer le bouchon InstantGold[™] et attendre que la solution soit entièrement absorbée. Lire immédiatement les résultats du test.



REVEAL[®] TP (Syphilis)





Interprétation des résultats

-  Dispositif médical in vitro
-  Conserver à 2-30°C
-  Lire attentivement la notice avant utilisation
-  Ne pas réutiliser

 medmira

CONDITIONS DE STOCKAGE : À conserver dans un endroit sec à 2 à 30 °C. Le Reveal[®] TP est stable jusqu'à douze (12) mois. Ne laissez pas ouvertes les pochettes contenant la cartouche de test et le bouchon InstantGold[™]. N'utilisez pas d'appareils périmés.

Antibody Test

Cartouche de test	Interprétation	Cartouche de test	Interprétation
	<p>Résultat de test non réactif Absence probable d'exposition au TP</p> <p>La présence d'une ligne rouge verticale sous le C et l'absence d'un point rouge à côté du T sur le test signifient que l'individu n'a probablement pas été exposé au TP. Après une exposition au TP, il peut s'écouler plusieurs mois pour que la réponse des anticorps atteigne des niveaux détectables. S'il y a des raisons de s'inquiéter, l'individu devrait refaire le test dans un délai de trois à six mois ou consulter un professionnel de la santé.</p>	 	<p>Résultats de tests invalides</p> <p>Le résultat est invalide si aucune ligne rouge n'apparaît sous le C, même si un point apparaît à côté de T sur le test. L'absence de la ligne rouge sous le C indique qu'il y a eu un problème, soit avec le test, soit avec l'échantillon, pendant la procédure de test.</p> <p>Si un résultat de test invalide survient, la procédure de test doit être répétée avec un nouveau test d'anticorps Reveal[®] TP (Syphilis). Si le problème persiste, contactez le service à la clientèle de MedMira.</p>
	<p>Résultat de test réactif Exposition probable au TP</p> <p>La présence d'une ligne rouge verticale sous le C et d'un point rouge à côté du T sur le test, peu importe l'intensité indique que l'individu a pu être exposé au TP. Tout point visible dans la zone T doit être considéré comme un résultat réactif. Cela signifie que des anticorps TP sont probablement présents dans le sang de l'individu, et qu'il devrait consulter un professionnel de la santé dès que possible. Tous les résultats réactifs doivent être confirmés et évalués en fonction de l'évaluation clinique avant qu'un diagnostic ne soit posé.</p>		